

Gebrauchsanweisung Diabeticus + Rheumaticus® Spezialsocken für Diabetiker + Amputationssocken für den Patienten und den Orthopädie-Fachmann



Liebe Kunden,

Sie haben mit diesen Socken ein hochwertiges Medizinprodukt der Klasse I nach der MDR Verordnung EU 2017/745 erworben. Da Sie auf die Socken genauso achtgeben sollten, wie auf Ihre Füße, geben wir Ihnen noch einige Tipps zur Pflege und Handhabung unserer Socken:

Bitte lesen Sie vor Gebrauch unseres Medizinproduktes die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise.

Zweckbestimmung des Produktes/Indikation:

Die Spezialsocken eignen sich für Menschen mit Diabetes Mellitus und/oder Vorfußamputationen

- Diabetes mellitus mit Sensibilitätsverlust durch PNP/pAVK
- Diabetes mellitus mit Sensibilitätsverlust durch PNP/pAVK, Zustand nach plantarem Ulcus
- Diabetes mellitus mit Sensibilitätsverlust durch PNP/pAVK mit Fußteillamputation
- Vorfußamputationen Lisfranc und Chopart

Zulässige Betriebsbedingungen/Einsatzorte:

- Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Bei unterschiedlichen Temperatur- und Wetterbedingungen
- Zum Schutz der Füße und Socken sollten immer Schuhe getragen werden

Anwendungshinweise Patient:

- Kontrollieren Sie täglich Ihre Füße auf Rötungen, Druckstellen oder Hautveränderungen und melden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort bei Ihrem Orthopädie-Fachmann oder Arzt
- Die Socken sollten nach der Tragezeit von einem Tag gewechselt werden
- Die Socken sind nur für einen einzelnen Patienten bestimmt. Eine Verwendung durch andere Personen ist nicht erlaubt

Sicherheitshinweise Patient:

Bitte beachten Sie vor jedem Tragen der „Diabeticus + Rheumaticus®“ Socken, insbesondere vor dem ersten Tragen, folgende Hinweise:

- Die Socken nicht ohne Schuhe tragen
- Neue Socken anfangs nur in Intervallen von 60 Minuten tragen. Anschließend die Füße auf Druckstellen untersuchen
- Kontrollieren Sie täglich Ihre Füße auf Rötungen, Druckstellen oder Hautveränderungen und melden Sie Auffälligkeiten sofort Ihrem Orthopädie-Fachmann oder Arzt

Mögliche Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

- Extreme Adipositas (BMI \geq 35)
- Erhebliche Visuseinschränkung
- Bei einer akuten Läsion (Ulcus oder noch florider DNOAP)
- Sollten Sie unter Hautallergien gegen die verwendeten Materialien leiden, halten Sie vor dem Gebrauch Rücksprache mit Ihrem Arzt

Materialangaben:

- 80% Baumwolle, 20% Polyamid
- Kein bewusster Einsatz von Latex oder DEHP

Reinigungs-, Pflege-, Lagerungs- und Desinfektionshinweise:

Reinigung:

- Maschinenwäsche bei 30°C, sorgfältig ohne Weichspüler nachspülen 
- Nicht bleichen 
- Keine chemische Reinigung 

Desinfektion:

- Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel
- Das Produkt ist nicht steril und ist auch nicht zu sterilisieren

Trocknung:

- Socken natürlich trocknen
- Nicht in den Trockner geben 

Pflege:

- Nicht bügeln 
- Vor Sonnenlicht schützen
- Trocken aufbewahren

Wartungshinweise:

- Die Socken sollten nach der Tragezeit von einem Tag gewechselt werden

Entsorgung:

- Die Entsorgung von Produkt und Verpackung muss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgen

Lagerung:

- Die Socken möglichst in einem Schrank bei Zimmertemperatur trocken lagern

Gewährleistung und Garantie:

- Wir gewähren die gesetzliche Garantiezeit. Garantie nur auf Material- und Verarbeitungsfehler unsererseits
- Keine Haftung für unsachgemäße Handhabung

Anwendungshinweise Orthopädie-Fachmann:

- Feststellen der Schuhgröße
- Anprobe der Socken
- Anleitung des Patienten über Sockenhandhabung (Anziehen, Ausziehen, Druckstellen, Einschneiden, Wechsel und Reinigung)
- Überprüfung des therapeutischen Nutzens nach einiger Tragezeit

Zusammenbau- und Montageanweisung:

- Socken aus Packung entnehmen
- Anprobe der Socken

Typenschild:

Symbole in der Gebrauchsanweisung:



Waschen bei maximal 30°C



Nicht im Wäschetrockner trocknen



Bügeln nicht erlaubt



Bleichen nicht erlaubt



Keine Chemische Reinigung

Verpackung:

- Auf der Verpackung ist die Modellbezeichnung, Größe und Artikelnummer vermerkt
- Die Socken sind in den folgenden Größen lieferbar: 35-38 / 39-41 / 42-43 / 44-45 / 46-47
- Die Socken sind in den folgenden Farben lieferbar: beige, grau, marine, schwarz, weiß
- Die Socken sind in einer dicken und einer dünnen Ausführung, sowie als Amputationssocken lieferbar

BATCH/LOT: z.B. 1644609 = Fertigungslosnummer, Charge (Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge / das Los identifiziert werden kann).



„Medical Device“ = Medizinprodukt



Hersteller des Produkts

CE

CE-Kennzeichnung = Bestätigung der Erfüllung der EU-Anforderungen

Hinweis für blinde und sehbehinderte Menschen:

Auf unserer Internetseite können Sie sich die Gebrauchsanweisung unter folgendem Link vorlesen lassen:

https://www.thanner-gmbh.com/gebrauchsanweisung/dia_spezi SOCKEN.php



Basis-UDI: 42518308Diabeticussocke2H

Die Produktgruppe „Diabeticus + Rheumaticus®“ Spezialsocken ist im Informationssystem über Medizinprodukte bei der BfArM gemäß § 86 MPDG unter der Registriernummer DE/CA61/RvS-SG53-2697.2-26/1-8 gelistet.

Sonderanfertigungen:

Sonderanfertigungen nach Maß tragen kein CE Zeichen

Bitte unterrichten Sie die Firma THANNER GmbH bei Auffälligkeiten, Problemen oder Defiziten der Socken.

Hersteller: THANNER GmbH • Am Fallenweg 30 • D-89420 Höchstädt
Tel.: ++49(0)9074/9551-0 • Fax: ++49(0)9074/9551-50 • info@thanner-gmbh.com
Internetadresse: thanner-gmbh.com • facebook.com/thanner.de • instagram.com/thannergmbh
SRN: DE-MF-000032767