

Wünsch' Dir was!

Modifikationen an teilkonfektionierten orthopädischen Schuhen



THANNER
SCHÄFTE
und mehr

Änderungen und Modifikationen


THANNER produziert alle Schuhe (Vithana, Vithana-Lady, Diabeticus+ Rheumaticus®, CuraPro, Stabil- und Lähmungsstiefel, Antivirus-Schuhe, Senso-Kid®, Fiori ...) im eigenen Haus in Höchstädt an der Donau.

Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Schuhe in sehr vielen Arten modifizieren zu lassen. Von unterschiedlichen Schuhgrößen, Weiten und Abschlussmaßen, bis zur Anfertigung nach Trittspur reichen die Variationen. Sie erhalten gerne individuelle Angebote und Kostenvoranschläge.

Individuelle Anpassungen

Schuhgrößen

- Sie haben die Möglichkeit, Unpaare zu bestellen (links eine andere Schuhgröße als rechts)
- Viele Serienschuhe sind im Katalog in einer Bandbreite von z. B. Größe 34 bis 47 angegeben. Es ist auch möglich, diese Schuhe in Unter- oder Übergrößen zu bestellen (bei der Fertigung wird sich evtl. der Sohlenaufbau verändern).
- Bitte benutzen Sie die Brandsohlen-schablonen, um die richtige Schuhgröße festzustellen.

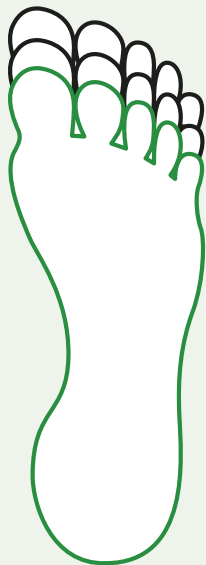

Schuhweiten

- Wir fertigen viele Schuhserien in bis zu fünf Standardweiten (SS, S, M, W, WW). Dabei haben Sie die Auswahl, links eine andere Weite als rechts zu bestellen.
- Falls die größte Weite nicht ausreicht, können Sie auch Sonderanfertigungen mit Mehrweite bestellen (siehe Weitungen).
- Bitte benutzen Sie die Brandsohlenschablonen, um die richtige Weite festzustellen.



Weite SS

Weite WW

Abschlussmaße / Schafthöhe / Verschluss

- Stiefelschäfte können Sie nach Belieben im Umfang (Über- oder Untermaß), sowie in der Höhe (Mehr- oder Minderhöhe) verändern.
- Die Standardhöhen und Abschlussmaße entnehmen Sie bitte den entsprechenden Tabellen, die den Prospekten beiliegen.
- Eine weitere Option besteht in der Veränderung des Verschlusses. Klettverschlüsse mit Gegenzug oder einfache Kletten, bzw. Ösen und Haken können gewählt werden.



Farben / Materialien

- Neben den vielen Standardschuhen besteht die Möglichkeit, die Schuhe in Bezug auf Material und Farbe zu verändern.
- Materialien und Farben können aus unserer Standard-Farbkarte ausgewählt werden.
- Auf Wunsch bemustern wir Ihnen gerne Sonderfarben und Materialien.
- Unterschiedlichste Futterausstattungen oder Kaschierungen mit wasserabweisenden, atmungsaktiven Membranen sind erhältlich.
- Bei Sicherheitsschuhen dürfen nur geprüfte Materialien verwendet werden.

Wir erfüllen auch Sonderwünsche!



Thanni

Nachfolgend geben wir Ihnen einige Beispiele für Veränderungsmöglichkeiten. Bei Anfertigung nach Trittspur oder Weitungen mit Übermaß können wir keine Garantie auf die Passform geben. Die Modifikationen sind Sonderanfertigungen über Konfektionsleisten und können **nicht** als orthopädische Maßschuhe abgerechnet werden.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Platzhalter / Verkürzungen

- Falls Sie stärkere Einlagen in die Schuhe legen möchten, können Sie Platzhalter in unterschiedlichen Stärken in den Schuh einarbeiten lassen (3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm).
- Verkürzungen werden aus Kork unter dem Leisten aufgebracht. Bitte geben Sie die Stärke an der Ferse, sowie im Ballen- und Spitzenbereich an (keine Höhenbegrenzung).
- Spitzfußausgleiche können nur sehr begrenzt eingearbeitet werden (maximal 1 cm).




Weitungen

- Falls die größte Schuhweite nicht ausreicht, können sogenannte Weitungen auf den Leisten angebracht werden. Die Weitungen können z. B. im Rist-, Ballen- und Zehenbereich erstellt werden, oder es kann die Zehenbox für Krallen- oder Hammerzehen erhöht werden.
- Geben Sie die Zehenhöhe und Position der Erhöhung an, sowie die Stärke der Einlage im Fersen-, Ballen- und Zehenbereich.
- Verbreiterungen der Auftrittsflächen sind ebenfalls möglich (mit individuellem Brandsohlen- und Sohlenaufbau).
- Die Veränderungen werden nach Ihren Angaben (Trittspur und Bilder) angefertigt, oder Sie leihen sich den Leisten aus und fertigen die Weitung selbst an.



Anfertigung nach Trittspur

- THANNER Schuhe können auch nach Trittspur bestellt werden.
- Bitte liefern Sie die Trittspur mit entsprechenden Maßangaben.
- Geben Sie bei Krallen- und Hammerzehen die Höhe und Position an.
- Wichtig ist auch die Stärke der Einlage im Fersen-, Ballen- und Zehenbereich.
- Sie können auch einen Leisten nach Maß anfertigen lassen (Kaufleisten), oder die Veränderung selbst durch Weitungen an einem Leisten vornehmen.
- Die Veränderungen sind nur begrenzt möglich.

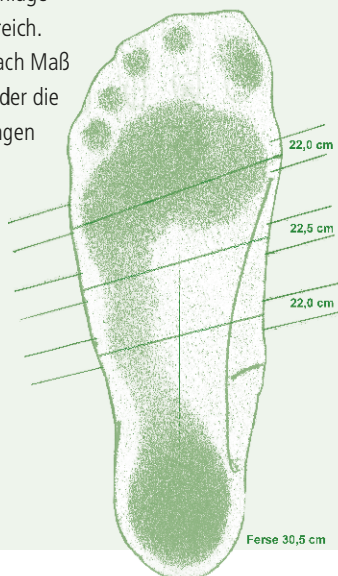

Schuhzurichtung

- Sie können an allen Straßenschuhen Schuhzurichtungen im Sohlenbereich durchführen lassen (Abrollsohlen, Richtungs- und Schmetterlingsrollen, Pufferabsätze und Absatzrollen, Verkürzungen, Innen- und Außenranderhöhungen usw.)
- Schuhzurichtungen bei Sicherheitsschuhen sind bei den Vithana Modellen mit den Laufsohlen Gera oder Securion® in S3 bis zu 3,5 cm Verkürzung möglich und baumustergeprüft. Abrollsohlen, Innen- und Außenranderhöhungen können ebenfalls gefertigt werden. Beachten Sie bitte die Montageanleitung!



Änderungen und Modifikationen

Hinterkappen

- Viele unserer Serienschuhe werden mit Lefakappen gefertigt, die im Innen- und Außengelenk verlängert sind.
- Die Hinterkappen können thermoplastisch verstärkt und verlängert werden (genaue Positionsangaben notwendig).
- Aussparungen für Haglundexostosen können erstellt werden.
- Bei verschiedenen Modellen aus den Schuhprogrammen Vithana und Diabeticus+Rheumaticus® können Knöchel- oder Arthrodesenkappen eingearbeitet werden.
- Bei manchen Stiefelmodellen ist es möglich, Peronaeskappen einzubauen.
- Bitte geben Sie die gewünschte Materialkombination an (Leder, Tauch, Thermo).



Vorderkappen

- Thermoplastische oder speziell für Diabetiker geeignete Vorderkappen sind je nach Schuhprogramm eingearbeitet.
- Sie können unterschiedliche Vorderkappenformen (gerade, flügel- oder stoßförmig) als Sonderanfertigung bestellen.
- Unterschiedlichste Materialien stehen zur Wahl (Tepp, Erkoflex, Gewebe usw.)
- Blatt- und Laschenversteifungen sind ebenso möglich.



Brandsohlen / Versteifungen

- Je nach Schuhprogramm sind die Schuhe mit versteifter oder unversteifter Brandsohle ausgestattet.
- Sie haben die Möglichkeit, andere Materialien (Leder oder Thermoplaste) einarbeiten zu lassen.
- Brandsohlenversteifungen können in Carbon (hart) oder Glasfaser (flexibel) gestaltet werden.
- Die Form der Versteifung kann selbstverständlich auch verändert werden, z. B. bei Großzehenamputationen oder Hallux rigidus.
- Sie können unter der Brandsohle Abrollungen aus Kork oder EVA aufbringen lassen.
- Eine andere Option ist das Aussparen von Bereichen an der Brandsohle oder das Einsetzen von Polsterungen.



Leisten nach Maß

Mit der Leisten-Software von THANNER können Sie alle THANNER Bruttoleisten spielend verändern. Es ist möglich, den Leisten auf die entsprechenden Fußmaße (unter Berücksichtigung der Brandsohlenbreite) automatisch zu skalieren oder ihn individuell in der Breite zu verändern.

Punktuelle Veränderungen für Krallen- und Hammerzehen oder Hallux valgus können vorgenommen werden. Jeder Halbschuhleisten ist auch als Beinleisten in der Leistenbibliothek hinterlegt. Die Fertigung des Leistens erfolgt innerhalb von fünf Arbeitstagen.

